


## Urineverzamelstelsel, portie urine

### Monstername uit urinepotje

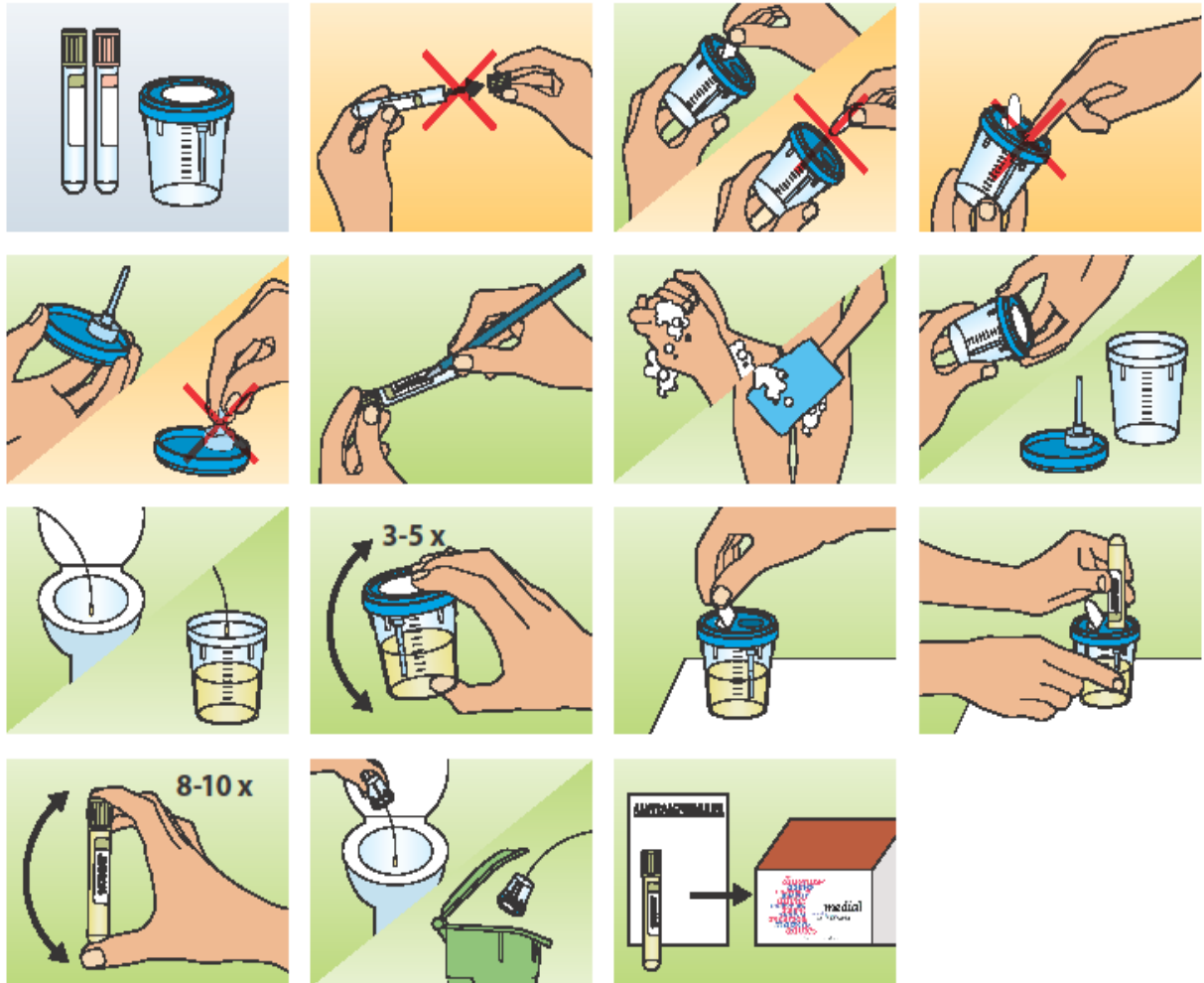

2 soorten buizen:

- lang 6 ml, zonder toevoeging
- Klein 4 ml, met Sodium borate

**Welke urine onderzoek gaat uit welke buis? [Zie pagina 2](#)**

**Voor ieder onderzoek wordt gevraagd om de juiste buizen te vullen en in te leveren met de benodigde aanvraagformulieren!!**



# Urineverzamelstelsel, portie urine

Welk urine-onderzoek gaat uit welke buis?



**A: 1 x 6 ml buis** (zonder toevoeging), voor:

MALP Micro-Albumine  
ALKR Albumine/kreatinine ratio  
OSMP Osmolaliteit  
KRUP Kreatinine  
NAKP Natrium/Kalium  
AMYP Amylase  
TEUP Eiwit in urine  
PCR Chlamydia, Gonorrhoe, Trichomonas  
CAUP Calcium  
FOSP Fosfaat  
UZUE urinezuur

**2 x 6 ml buis** (zonder toevoeging) voor

LKET: lichte ketens in portie urine  
ELEU elektroforese in portie urine




**B: 1 x 6 ml buis** (zonder toevoeging)\*

voor:

SCR Urine screening  
SG Soortelijk gewicht  
KRIS Kristallen  
LKET DAPO Apotheek: Drugsscreening  
Pathan urine voor afd pathologie

PORF\* Porfyrine/porfobilinogeen: in donker bewaren, direct in aluminiumfolie wikkelen!

Indien A en B wordt aangevraagd → 2 buizen inleveren.

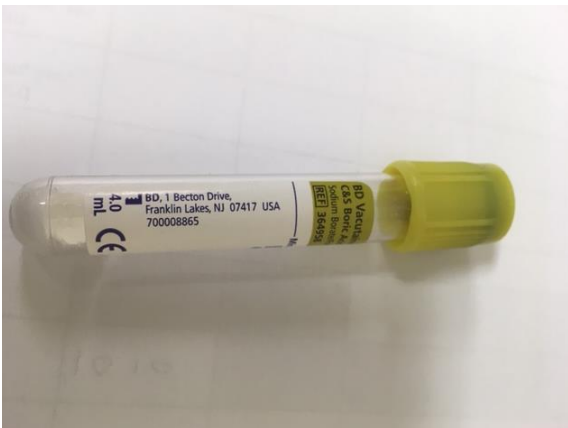

**1 x 4 ml buis** met Sodium Borate

UKW Urinekweek

DERY\* dysmorphe ery's/cylinders:

\*Moet in verse urine bekeken worden. Urine moet na productie direct (binnen een half uur) afgeleverd worden bij de balie bloedafname. Inleveren in urinepotje of 6 ml buis.